

ZELOSTAT Syringe シリンジ


再使用禁止

文書管理番号:D-008-01

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図>

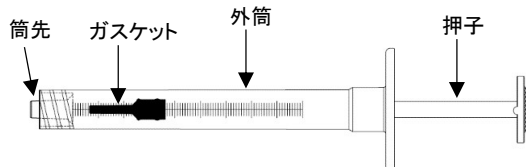

<薬液を介して身体に接する部分の原材料>

ガスケット : エラストマー
外筒 : ポリカーボネート
潤滑剤 : シリコン油

【使用目的又は効果】


本品は、液体又はガスを注射・注入するか引き抜くために用いる器具である。主として、注射針を用いて薬剤の投与又は採血に用いる。

【使用方法等】

1. 本品を包装から取り出す。
2. 注射又は採血に使用する場合は、注射針等と確実に接続し、使用する。
3. 穿刺部位を消毒する。
4. 穿刺部位に穿刺し、注射又は採血等を行う。
5. 針を抜去後、必要な場合は、止血する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品に衝撃を与えないこと。
[破損する可能性がある。]
2. 他の医療機器と接続する場合は、以下の事項を順守すること。
(1) 接続部にゆるみがないことを確認してから使用すること。
(2) 接続する際は、過度な締め付けをしないこと。
[筒先に破損、空回りが生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。]
(3) 接続部分に薬液又は血液を付着させないこと。
[接続部の緩み、空回り等が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。]
(4) メスコネクターと接続する際は、横方向の力を加えないこと。
[筒先に曲がりや破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。]
(5) 目盛り合わせは、下記の位置で行うこと。

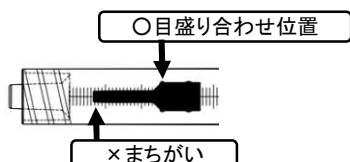

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 包装や製品に破損、変形、汚損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 使用前、接続部に緩みのないことを確認すること。
また、使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れについて、定期的に確認すること。
3. 医薬品の種類によっては、本品の外筒の内側に塗布されているシリコーン油が析出することがあるので注意すること。
シリコーン油が析出した場合は、医薬品の添付文書を確認し、適切な処置をとること。
4. ガスケット部に注射針等で傷をつけないこと。
[破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある]
5. 外筒印刷部の目盛を越えて押子を引かないこと。
[押子が外筒から抜けて液漏れが生じる可能性がある。]
6. 押子はまっすぐに引くこと。
[斜めに引くと、ガスケットと外筒との密着性が悪くなり、液漏れ、空気の混入又はガスケットが外れる可能性がある。]
7. 本品を鉗子等でつまんで傷をつけないこと。
[破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。]
8. 外筒印刷部の目盛をこすらないこと。
[目盛が消える可能性がある。]
9. 造影剤等の高圧注入には使用しないこと。
[液漏れ又は破損する可能性がある。]
10. 包装開封後はすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。
11. 注射針等を接続し使用する場合は、針刺しに注意し慎重に取り扱うこと。
12. シリンジポンプと組み合わせて使用しないこと。
(シリンジポンプとの組み合わせは検証されていない)

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水濡れに注意し、高温・多湿及び直射日光を避けて保管すること。

<有効期間>

・外箱に記載(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:ASTI株式会社

TEL 053-428-5644